

QuickClip Pro™ Clip Fixing Device (HX-202LR, HX-202UR)

Guía de referencia rápida

QuickClip Pro está diseñado para la colocación de clips endoscópicos dentro del tracto gastrointestinal.

PRECAUCIÓN: Esta guía es solo un resumen de las instrucciones de uso para el HX-202LR y el HX-202UR QuickClip Pro. Asegúrese de seguir el Manual de instrucciones incluido en el paquete del dispositivo.

Preparación antes de usar

- 1 Retire el dispositivo del paquete. Retire la tapa protectora negra. Confirme que la unión del tubo amarillo, el tapón rojo y el mango están conectados sin espacios, e inserte el dispositivo en el canal endoscópico.



Una vez que el dispositivo se extiende desde el extremo distal del endoscopio, retire el tapón rojo.




Conecte la junta del tubo amarillo y el extremo distal del mango.



El clip se abrirá automáticamente cuando se extienda desde la vaina. Si prefiere que el clip salga en una posición cerrada, aplique una ligera presión en el control deslizante del mango mientras la unión del tubo amarillo y el mango están conectados.

Alinee el clip con el sitio de destino

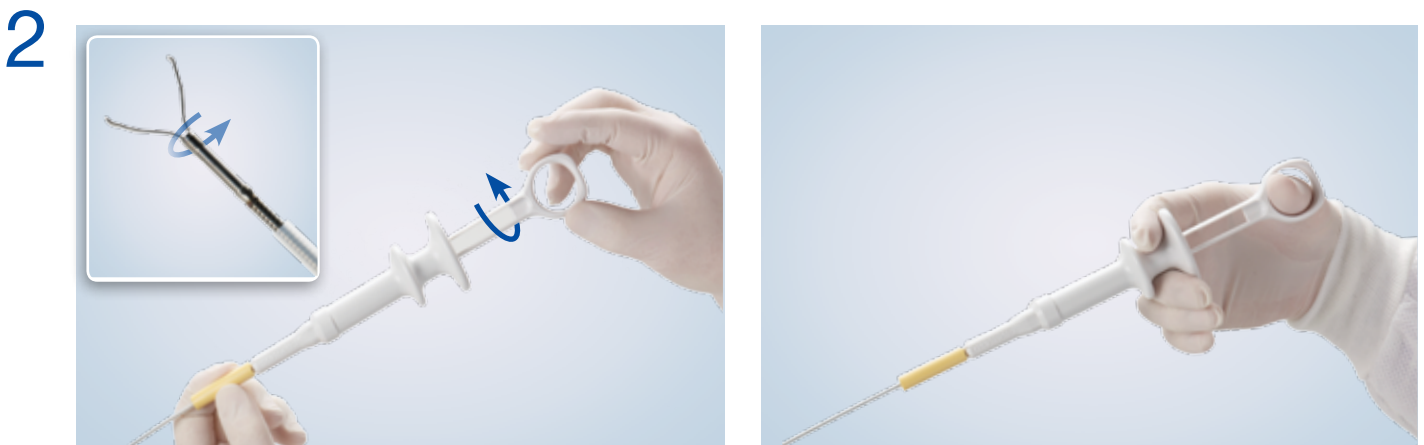

Para alinear el clip con el sitio de destino, sostenga el cilindro amarillo con una mano y gire todo el mango con la otra mano.

Cuando el clip esté en la posición deseada, retire la mano del tapón amarillo.

QuickClip Pro™ Clip Fixing Device (HX-202LR, HX-202UR)



Guía de referencia rápida

QuickClip Pro está diseñado para la colocación de clips endoscópicos dentro del tracto gastrointestinal.

PRECAUCIÓN: Esta guía es solo un resumen de las instrucciones de uso para el HX-202LR y el HX-202UR QuickClip Pro. Asegúrese de seguir el Manual de instrucciones incluido en el paquete del dispositivo.

Operación y funcionalidad

3




Para cerrar: Tire del control deslizante hacia el anillo del pulgar hasta que sienta resistencia y vea en la vista endoscópica que los brazos del clip están cerrados.



Para volver a abrir: Empuje el control deslizante lejos del anillo para el pulgar para reposicionar el clip según sea necesario antes de la implementación.

Implementar el clip en el sitio de destino

4

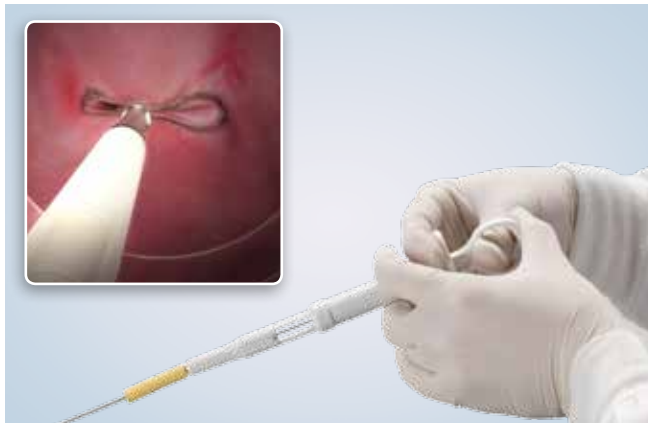

Presione el clip firmemente contra el tejido objetivo y cierre el clip. Despliegue el clip tirando del control deslizante con ambas manos hacia el anillo del pulgar. Sentirá presión y escuchará un clic notable.



Empuje el control deslizante completamente lejos del anillo del pulgar para liberar el clip. Confirme visualmente que el clip se ha soltado antes de quitar la funda del telescopio.