

Minimizar los daños al endoscopio

Olympus se compromete a ayudarle a aprovechar al máximo su equipo de endoscopia. La información mostrada a continuación tiene como objetivo destacar las causas comunes de daño a los endoscopios y proporcionar consejos para reducir las reparaciones. De esta forma puede mantener su equipo funcionando a un nivel óptimo.

¿QUÉ NO HACER?	CONSECUENCIA	RECOMENDACIÓN
Ejercer presión excesiva sobre el tubo de inserción en la base del endoscopio.	Deformación del tubo de inserción; daño a los componentes internos.	Evite doblar el tubo de inserción a menos de 10 cm de la unión de la funda del endoscopio.
Forzar accesorios a través del canal de biopsia.	Perforación del canal de biopsia; invasión de líquidos.	Revise los accesorios antes del procedimiento y utilice movimientos lentos y cortos al insertar accesorios en el canal de biopsia.
Olvidar conectar el adaptador de limpieza del canal de aire/agua durante la pre-limpieza.	Obstrucción la boquilla de aire/agua, flujo deficiente de aire/agua.	Use siempre el adaptador de limpieza del canal de aire/agua durante la pre-limpieza.

Para obtener asistencia inmediata con respecto a la reparación o el servicio de sus endoscopios Olympus, llame al 800-848-9024 y seleccione la opción n°3 www.medical.olympusamerica.com/serviceportal

