

ディスポーザブル把持鉗子 LA-400 FlexLifter 準備方法




以下の手順書は、FlexLifterを正しく使用していただくために、ご使用前に行う準備の手順を示したものです。
点検を含めた詳細については、『取扱説明書』と『添付文書』をよくお読みの上、その指示に従ってご使用ください。


『取扱説明書』の指示に従って点検を行ってください。

STEP 1 内視鏡への装着

- 1 進退グリップ部のボタンを押しながら、糸が張った状態になるまでハンドル部を押し込みます。

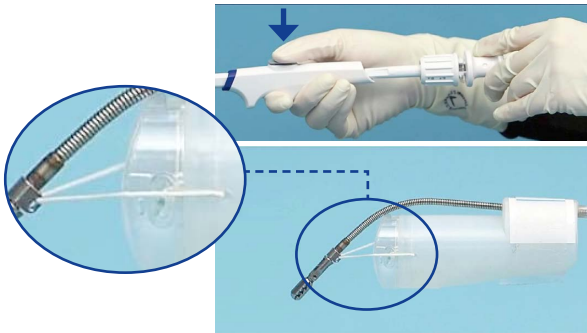

- 2 内視鏡画像を確認しながら、把持部が12時方向になるようにキャップの向きを合わせます。内視鏡先端にキャップが突き当たるまで、キャップを押し込みます。

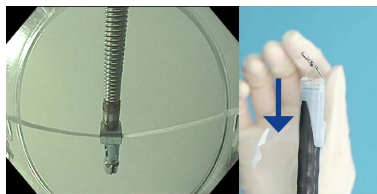

- 3 進退グリップ部のボタンを押しながらハンドル部を引き込みます。




※内視鏡先端部および挿入部に粘液や血液、潤滑剤などが付着している場合は、完全に拭き取ってください。

STEP 2 内視鏡先端部への固定

内視鏡挿入部をまっすぐな状態にします。
フードテープの剥離紙をはがします。
フードテープを引っ張りながら一周させ、フードテープの基準線が指標線を越えるように貼ります。




フードテープの基準線が1~2mmほど指標線を越すようにフードテープを引っ張るようにしてください。

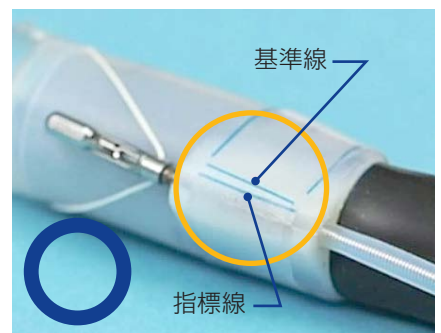

STEP 3 内視鏡蛇管部への固定

チューブシースを内視鏡挿入部に沿わせ、3か所すべてのスリーブを内視鏡挿入部に取り付けます。
スリーブテープを引っ張りながら一周させ、スリーブテープの基準線が指標線を越えるように貼ります。3か所すべてのスリーブをスリーブテープで固定します。

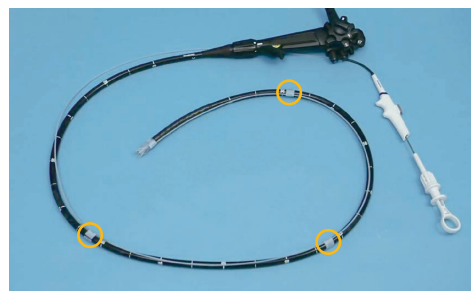

STEP 4 各機能の動作点検


- 1** 内視鏡湾曲部がスムーズに湾曲することを確認します。




- 2** キャップを指でつまみ、軽く引っ張っても内視鏡先端部から外れないことを確認します。



- 3** ロックボタンを押した状態で、把持部が確実に進退することを確認します。

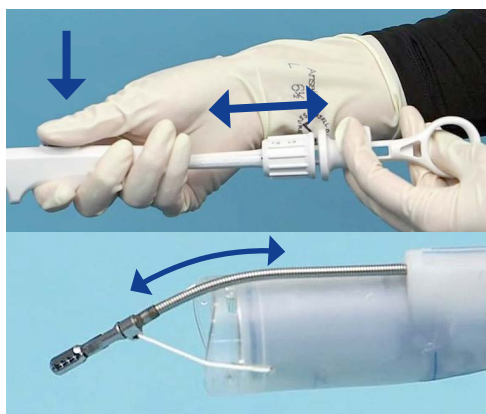

- 4** 糸が張った状態で把持部が確実に開閉することを確認します。

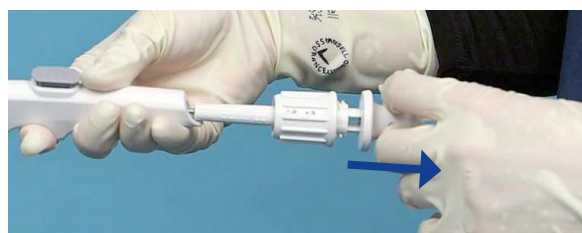

この動画は
こちらの QR コードから
ご覧いただけます

