


Guia de Referência Rápida EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus - Configuração

ATENÇÃO: Esta guia de referência é apenas um resumo das instruções de uso da EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus. Para instruções mais detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções que acompanha o seu equipamento.


Conectando Endoscópios de Ultrassom

- 1 Insira os ecoendoscópios de varredura mecânica na entrada da esquerda (**SOCKET1**) ou os ecoendoscópios de varredura eletrônica na entrada da direita (**SOCKET2**). Gire a alavanca do conector de ultrassom no sentido horário para travar.
- 2 Pressione o botão **POWER** e confirme que o indicador de energia (luz verde) está aceso.
 - * Confirme se os interruptores **POWER** ou **ACTIVE** estão desligados ao conectar o ecoendoscópio.
 - * Demora aproximadamente um minuto para iniciar a EU-ME2.
 - * Para trocar os ecoendoscópios, desligue o interruptor **ACTIVE**, o que evita o incômodo de desligar a EU-ME2.

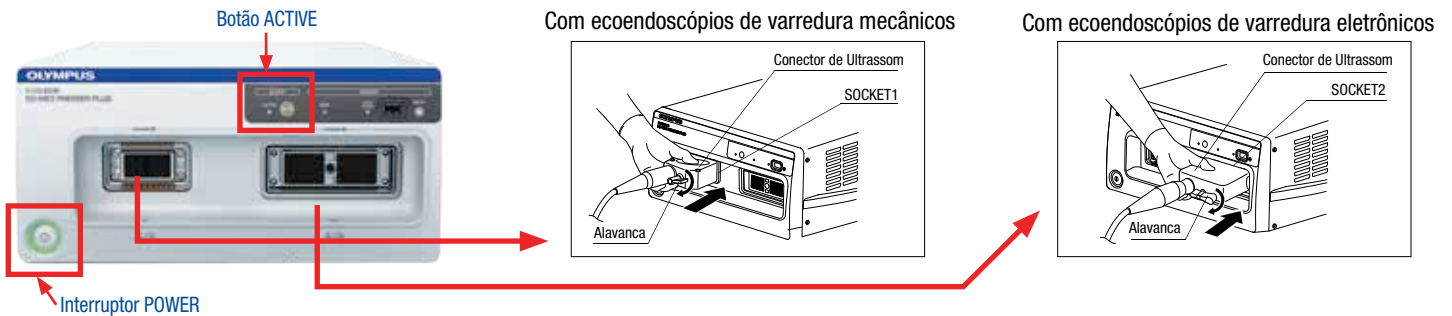

Vídeo / EUS

- 1 Pressione a tecla **VIDEO SOURCE** (fonte de vídeo) no teclado para alternar entre US e EVIS.
 - * A operação EVIS pode ser controlada pelo teclado ou pelo painel de tela LCD sensível ao toque.
 - * Este recurso está disponível apenas quando 2 teclados estão integrados.

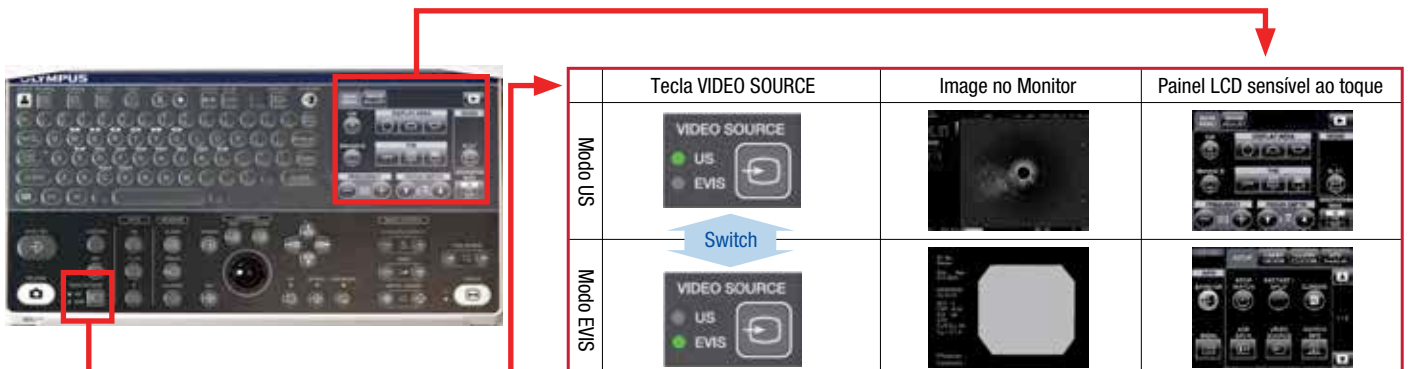


Guia de Referência Rápida EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus - Configuração

ATENÇÃO: Esta guia de referência é apenas um resumo das instruções de uso da EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus. Para instruções mais detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções que acompanha o seu equipamento.


Entrada ID

- 1 Pressione a tecla **ID INPUT** (entrada dos dados de identificação) e a tela **Patient Data** (dados do paciente) é exibida no monitor.
- 2 Insira todos os dados necessários e clique em **OK** para prosseguir.
 - * A entrada dos dados de identificação é obrigatória para salvar dados após os exames.
 - * Quando a EU-ME2 é integrada com a CV-190 ou CV-180, a entrada dos dados de identificação não fica disponível na EU-ME2 e os dados do paciente devem ser inseridos através do sistema CV-190

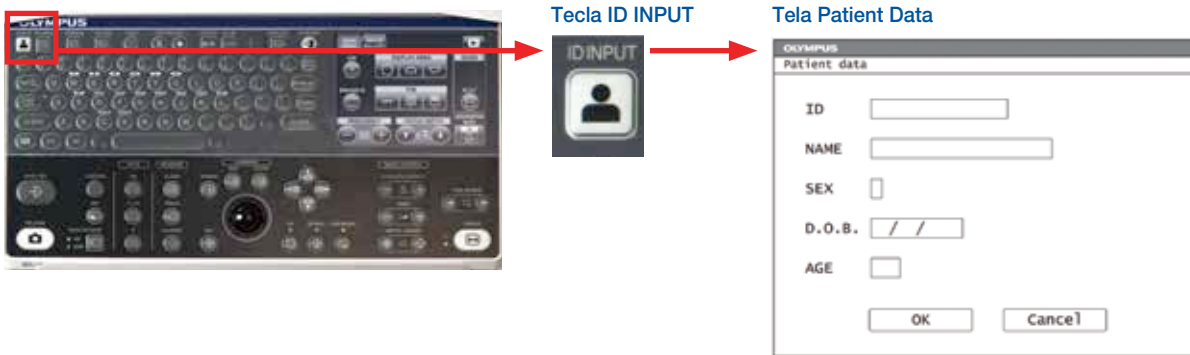

Seleção de Modo

- 1 Pressione as teclas **B**, **FLOW** e **PW** no teclado para selecionar o modo B, modo FLOW e o modo Doppler de Onda Pulsada, respectivamente.
- 2 Pressione o botão **ELST** para selecionar o modo Elastografia se estiver utilizando a EU-ME2 Premier Plus.
 - * Não é possível alternar no modo FREEZE.
 - * Consulte o guia separado com relação à seleção do modo FLOW (COLOR FLOW, POWER FLOW e H-FLOW).
 - * Consulte o guia separado com relação ao modo Elastografia.
 - * O botão **ELST** no painel LCD sensível ao toque é exibido no canto superior direito do MAIN MENU (menu principal) (exibido logo após o descongelamento).
 - * O **ELST** irá aparecer apenas na EU-ME2 Premier Plus.

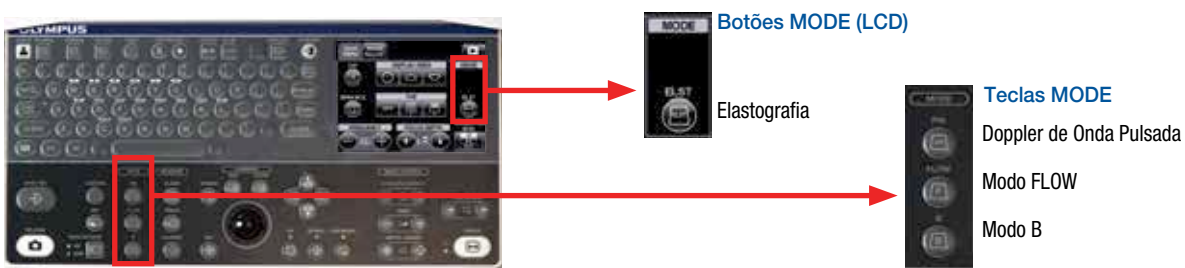

Guia de Referência Rápida EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus - Configuração

ATENÇÃO: Esta guia de referência é apenas um resumo das instruções de uso da EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus. Para instruções mais detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções que acompanha o seu equipamento.


Memória Portátil

- 1 Insira a **Portable Memory** (memória portátil) na **Portable Memory Port** (porta de memória portátil) no painel frontal até ela travar.
- 2 Assegure-se que o **Portable Memory Access Indicator** (indicador de acesso da memória portátil) está aceso.
 - * **Nota:** O **Indicador de acesso da memória portátil** permanece aceso (verde) quando o dispositivo está pronto e pisca (laranja) quando a EU-ME2 estiver acessando a memória. Quando a luz laranja estiver piscando, não remova a **Memória Portátil**.



Gerenciamento dos Dados (Move Data)

- 1 Pressione a tecla **MOVE DATA** e a tela **Move Data** (mover dados) (abaixo) é exibida no monitor.
- 2 Selecione o tipo do movimento dos dados.
- 3 A tela **Progress Bar** (barra de progresso) é exibida no monitor enquanto os dados estão sendo movidos. A tela **Progress Bar** (barra de progresso) desaparece quando a movimentação dos dados é concluída.
 - * Não desligue a EU-ME2 ou o dispositivo de armazenamento externo enquanto a Barra de Progresso está sendo exibida.
 - * É altamente recomendado realizar uma cópia de segurança de dados periodicamente.

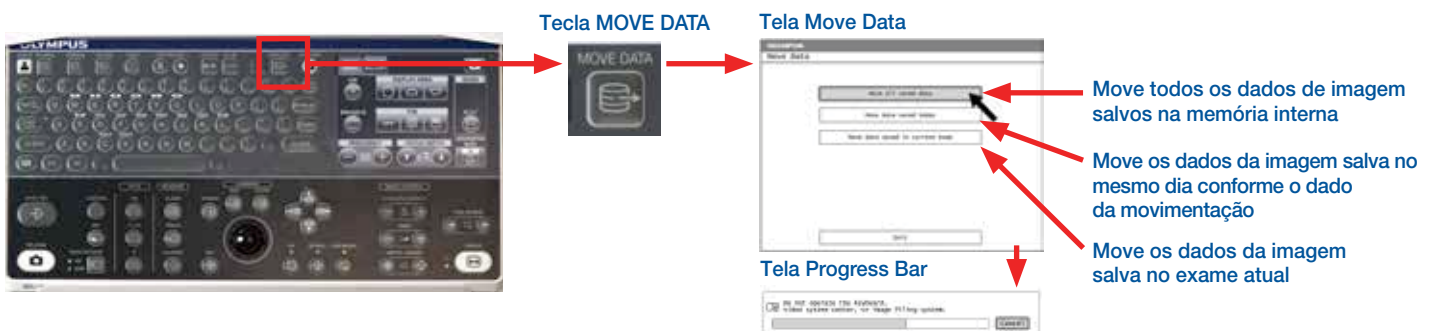

Guia de Referência Rápida EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus - Configuração

ATENÇÃO: Esta guia de referência é apenas um resumo das instruções de uso da EU-ME2 e EU-ME2 Premier Plus. Para instruções mais detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções que acompanha o seu equipamento.

Exam End

- 1 Pressione a tecla **EXAM END** (fim do exame) no teclado para restaurar a EU-ME2 para as configurações originais.
 - * Se um exame iniciar com a CV-190/CV-180, o teclado da EU-ME2 deve ser usado no modo de operação EVIS. Nesse caso, utilize o botão EXAM ON no painel LCD sensível ao toque.




Configurações restauradas após pressionar EXAM END:

Configuração	Valor Definido
Monitor de observação	Imagem de ultrassom liberada
Tela com dados do paciente	Liberada
Tela de comentários	Liberada
Tela do resultado da medição	Liberada
CONGELAR	Congelada

Desconectando Endoscópios de Ultrassom

- 1 Pressione o botão **POWER** e confirme que o indicador de energia (luz verde) não está aceso.
- 2 Gire a alavanca do conector de ecoendoscópio no sentido anti-horário para desconectá-lo. Remova o conector assim que a alavanca parar.
 - * Confirme se os botões **POWER** ou **ACTIVE** estão desligados ao desconectar o ecoendoscópio.
 - * Para trocar os ecoendoscópios, desligue o botão **ACTIVE**, o que evita o incômodo de desligar a EU-ME2.

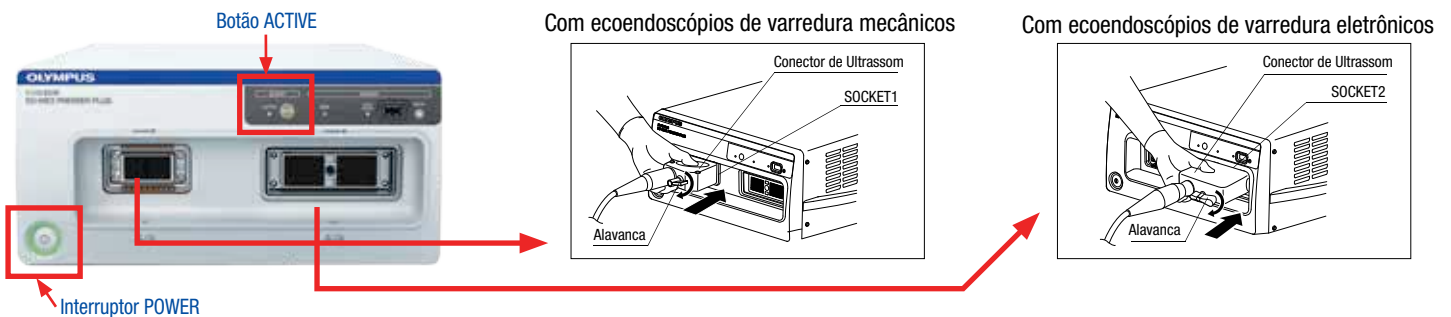

As especificações, projetos e acessórios estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante.