

GUIA DE DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO


Gastrovideoscópios de ultrassom

Consulte o *GUIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO* complementar para informações de limpeza

AVISO: Este guia é apenas um resumo das etapas necessárias para limpar corretamente seu endoscópio. Certifique-se de seguir as etapas detalhadas descritas no *MANUAL DE INSTRUÇÕES* incluído na compra do seu endoscópio.

DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL


1

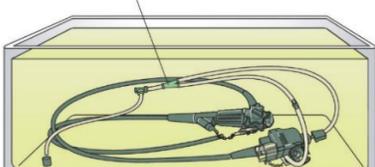

Tubo de injeção

Conecte a tampa dos canais e o tubo de injeção ao endoscópio previamente limpo e imerja o equipamento completamente na solução de desinfecção.

2

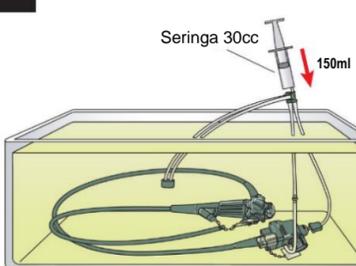


Seringa 30cc

150ml

Use uma seringa para encher completamente os canais de aspiração, ar/água, e balão com solução desinfetante.

3 **Somente para endoscópios com elevadores:**

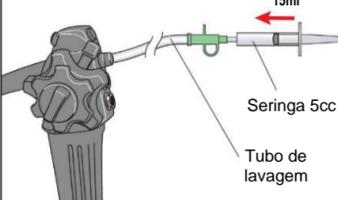

15ml


Seringa 5cc

Tubo de lavagem

Injete solução desinfetante no canal do elevador. Em seguida, movimente o elevador e com o mesmo levantado, injete* solução desinfetante diretamente sobre ele.

*30ml


4

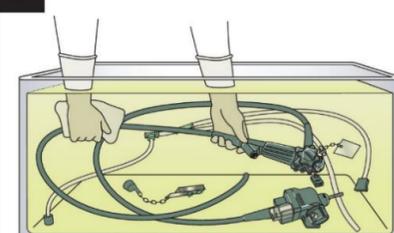

Enquanto o endoscópio estiver imerso, desconecte os acessórios de limpeza e use um pano limpo e sem fiapos para remover as bolhas presentes nas superfícies externas do equipamento.


ENXÁGUE

5

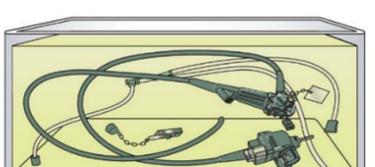

Mantenha todo o equipamento imerso em solução desinfetante de acordo com o tempo e a temperatura recomendados pelo fabricante do desinfetante. Use um temporizador para medir o tempo exato do contato.


6

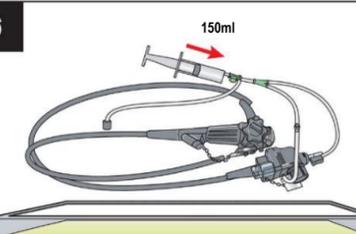

150ml

Conecte a tampa dos canais e o tubo de injeção. Injete ar para remover o desinfetante dos canais de ar/água, aspiração e balão. Retire o endoscópio do desinfetante.

7 **Somente para endoscópios com elevadores:**

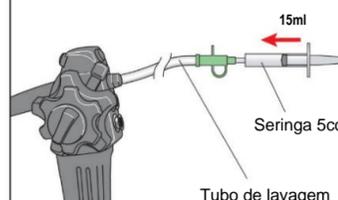


15ml

Seringa 5cc

Tubo de lavagem

Injete ar no canal do elevador para remover o desinfetante.


8 **ATENÇÃO:** Siga as instruções de lavagem do fabricante do desinfetante.

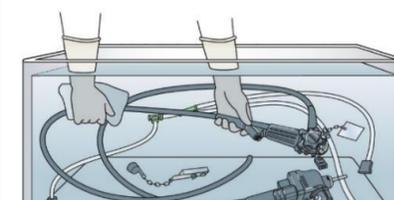

Desconecte a tampa dos canais e o tubo de injeção. Mergulhe o endoscópio e as peças separadas em água limpa. Enxágue bem todas as superfícies externas.

SECAGEM


9

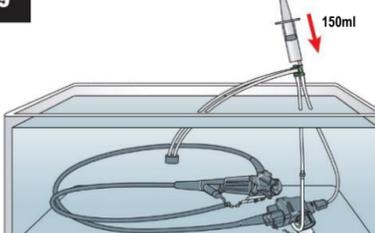

150ml

Conecte a tampa dos canais e tubo de injeção ao endoscópio. Use uma seringa para injetar água nos canais de ar/água, aspiração e balão.

10 **Somente para endoscópios com elevadores:**

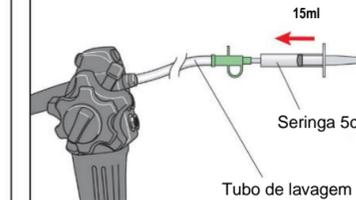


15ml

Seringa 5cc

Tubo de lavagem

Injete água no canal do elevador.


11

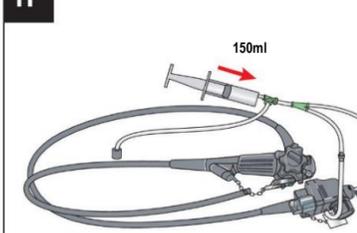

150ml

Retire o endoscópio da água de enxágue. Use uma seringa para injetar ar através dos canais de ar/água, aspiração e balão, expulsando a água de enxágue.

12 **Somente para endoscópios com elevadores:**

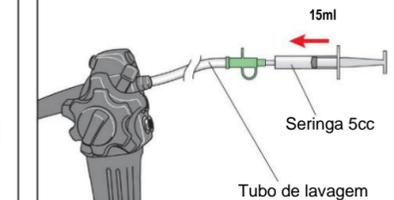


15ml

Seringa 5cc

Tubo de lavagem

Injete ar para secar o canal do elevador.

13

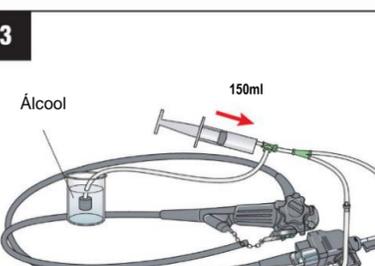


150ml

Álcool

Use uma seringa para injetar álcool 70% nos canais de ar/água, aspiração e balão. Em seguida, injete ar para remover o álcool do interior dos canais.

14 **Somente para endoscópios com elevadores:**

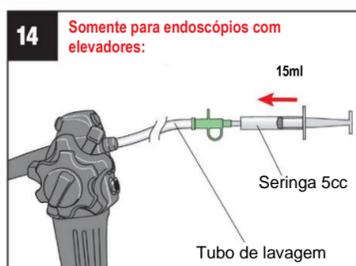


15ml

Seringa 5cc

Tubo de lavagem

Injete álcool 70% no canal do elevador. Depois injete ar para remover o álcool.

15

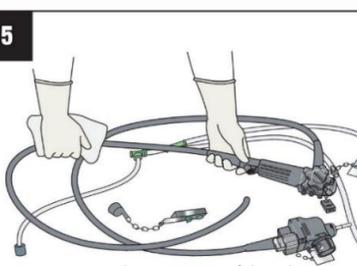

Desconecte todos os acessórios do endoscópio. Seque o endoscópio e os acessórios com um pano umedecido em álcool. Certifique-se de que o equipamento esteja completamente seco antes do armazenamento.


GF-UCT180: Antes de secar externamente, retire apenas o tubo de injeção (mantendo a tampa dos canais) e conecte um aspirador no conector de aspiração e aspire ar por 15 segundos.

IMPORTANTE

- Use um desinfetante compatível e teste a concentração adequada de acordo com as instruções do fabricante.
- Reprosse todas as peças removíveis (por exemplo, válvulas) de acordo com o manual de reprocessamento.
- Armazene o endoscópio pendurado verticalmente com válvulas e tampas removidas, e com as travas dos freios na posição "livre".

Limpe o endoscópio meticulosamente antes da desinfecção.

Conexões dos canais para a série GF-UM

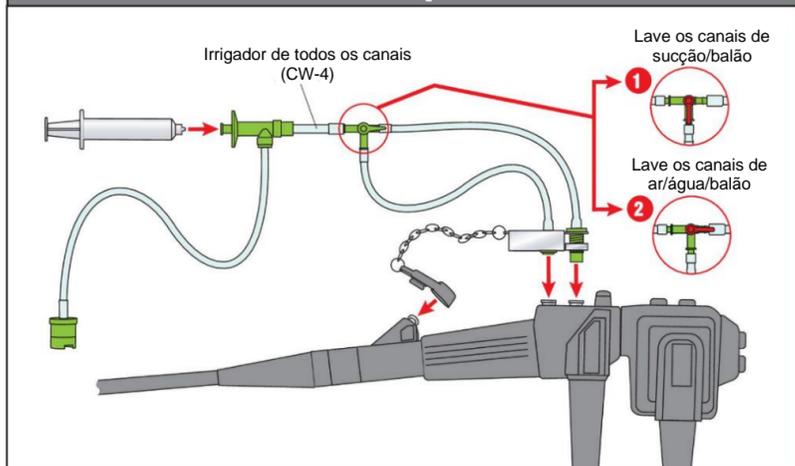

Conexões dos canais para a série GF-UC

