


Συσκευή απολίνωσης PolyLoop (HX-400U-30)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Προσοχή: Αυτός ο οδηγός αποτελεί μόνο μια περίληψη των οδηγιών χρήσης για το HX-400U-30 PolyLoop. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε το εγχειρίδιο οδηγιών Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 που περιλαμβάνεται στην αγορά του HX-400U-30 που πραγματοποιήσατε.

Ονοματολογία

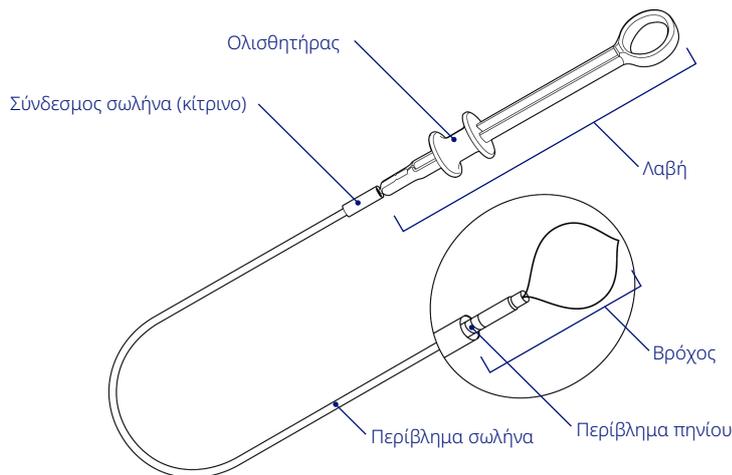


Προετοιμασία

1. Για την ανύψωση του βρόχου μέσα στο περίβλημα σωλήνα, ωθήστε περιφερικά τον σύνδεσμο σωλήνα. Εισαγάγετε προσεκτικά το όργανο μέσα στη βαλβίδα βιοψίας.

Λειτουργία



2. Για την επέκταση του βρόχου από το περίβλημα σωλήνα, τραβήξτε τον σύνδεσμο σωλήνα μέχρι να αγγίξει τη λαβή.

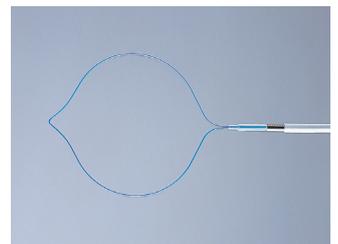

Συσκευή απολίνωσης PolyLoop (HX-400U-30)



Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Λειτουργία (συνέχεια)

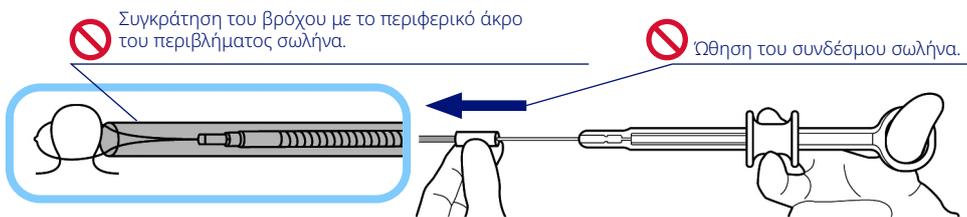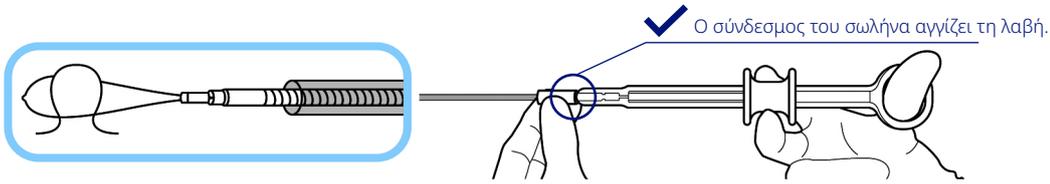

3. Περιβάλετε τον ιστό με τον ανοικτό βρόχο. Τραβήξτε τον ολισθητήρα για να απολινώσετε τον σχετικό ιστό.

Προσοχή: Μην ασκείτε περιττή δύναμη στον βρόχο κατά την απολίνωση ιστού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

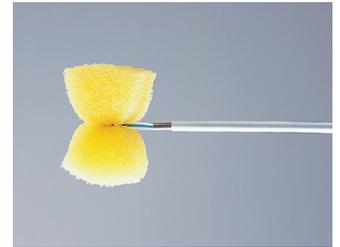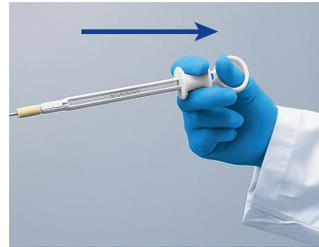

4. Ωθήστε τον ολισθητήρα μέχρι να σταματήσει για την επέκταση του άγκιστρου από το περίβλημα του πηνίου. Αποσπάστε τον βρόχο από το άγκιστρο.

Προσοχή: Μην αφαιρείτε τον βρόχο από το άγκιστρο ενώ το περίβλημα πηνίου δεν έχει προεκταθεί από το περίβλημα σωλήνα.




Προσοχή: Με το εγγύς άκρο του περιβλήματος σωλήνα και τη λαβή τοποθετημένα ίσια με τη βαλβίδα βιοψίας του ενδοσκοπίου, ωθήστε τον ολισθητήρα.



Συσκευή απολίνωσης PolyLoop (HX-400U-30)

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Λειτουργία (συνέχεια)

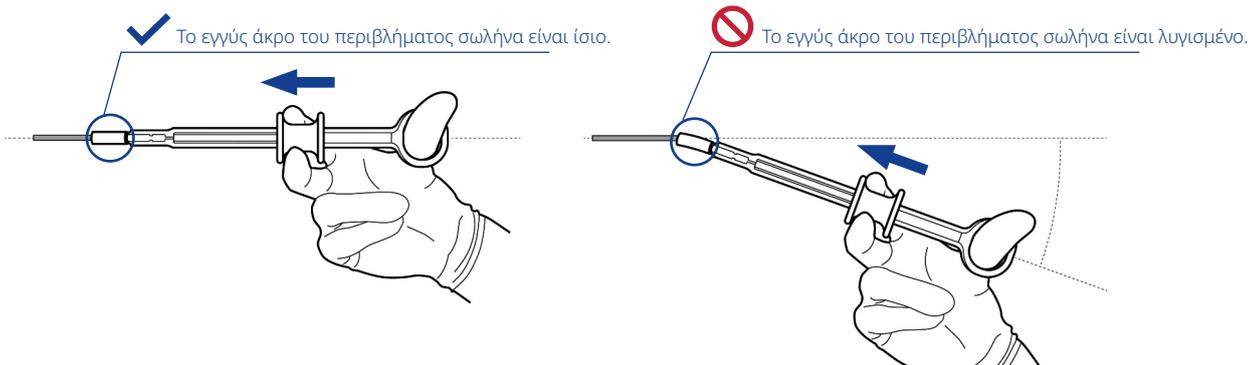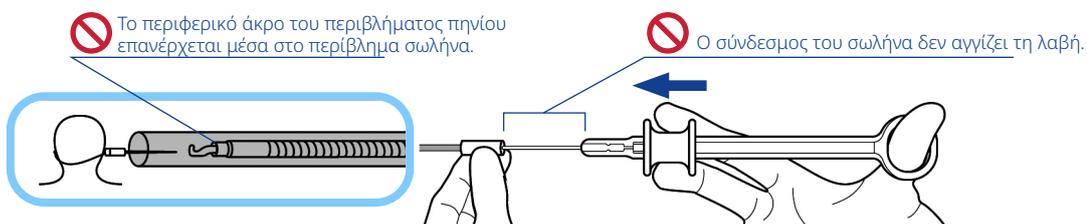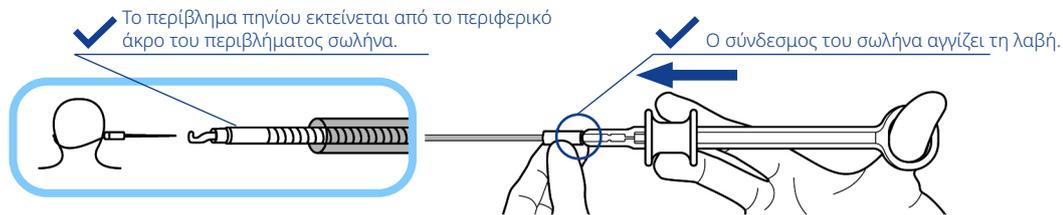

Σημείωση: Έχετε πάντα έτοιμο τον κόφτη βρόχων της Olympus, την πένσα ή/και τους κόφτες σύρματος για να κόψετε το περίβλημα πηνίου, το περίβλημα σωλήνα και το σύρμα χειρισμού, σε περίπτωση που ο βρόχος δεν μπορεί να αποσπαστεί από το όργανο.



Συσκευή απολίνωσης PolyLoop (HX-400U-30)




Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Θεραπεία έκτακτης ανάγκης

Αν ο βρόχος δεν μπορεί να αποσπασθεί από το όργανο, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.


1. Ισιώστε το τμήμα του ενδοσκοπίου που εκτείνεται από τον ασθενή.

- Ισιώστε το τμήμα του οργάνου που εκτείνεται από τη βαλβίδα βιοψίας.
- Ωθήστε τον ολισθητήρα μέχρι να σταματήσει για την επέκταση του αγκίστρου από το περίβλημα πηνίου.

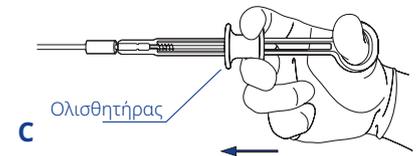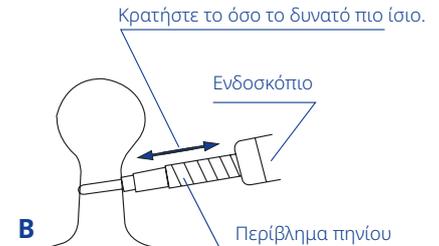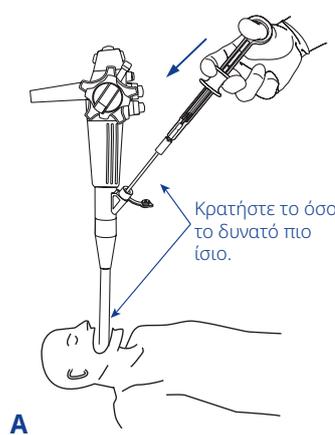


2. Κόψτε το περίβλημα σωλήνα, το περίβλημα πηνίου και το σύρμα χειρισμού χρησιμοποιώντας πένσες ή κόφτες συρμάτων.

- Αποσύρετε το ενδοσκόπιο.

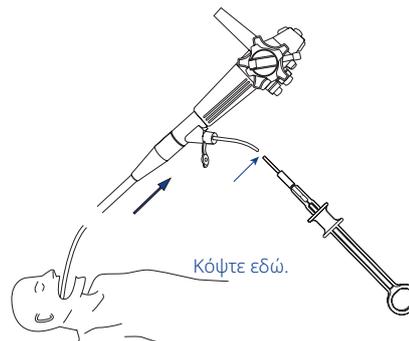

3. Όταν το περιφερικό άκρο του περιβλήματος πηνίου δεν βρίσκεται κοντά στον αναστολέα βρόχου.

- Εισαγάγετε ξανά το ενδοσκόπιο κατά μήκος του περιβλήματος σωλήνα.
- Κόψτε τον βρόχο χρησιμοποιώντας τον κόφτη βρόχων της Olympus.
- Αποσύρετε το περίβλημα σωλήνα, το περίβλημα πηνίου και το σύρμα χειρισμού μαζί.

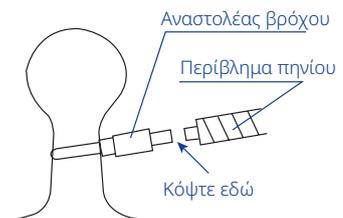

Όταν το περιφερικό άκρο του περιβλήματος πηνίου βρίσκεται κοντά στον αναστολέα βρόχου.

- Αφήστε τον βρόχο στη θέση του μέχρι να επέλθει νέκρωση του ιστού και να απελευθερωθεί ο βρόχος και ο ιστός. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.
- Εκτελέστε ανοικτή χειρουργική επέμβαση ή άλλη πιθανή θεραπεία.

Καθώς η γνώση στον ιατρικό κλάδο αναπτύσσεται συνεχώς, ενδέχεται να απαιτούνται τεχνικές τροποποιήσεις ή αλλαγές στον σχεδιασμό των προϊόντων, τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα παρελκόμενα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

OLYMPUS

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Wendenstrasse 20, 20097 Hamburg, Germany
Αριθμός τηλεφώνου: +49 40 23773-0
www.olympus-europa.com

Διανομέας
PAPAETIS MEDICAL CO. LTD
Λεωφ. Αθαλάσσης 75, Πύργος Charo, Γραφ. 501, Τ.Θ.
6456, Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός τηλεφώνου +357 22 204600

Διανομέας
PROTON S.A.
Medical, Hospital Equipment & Supplies Engineers
Ιουλιανού 2, 14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα
Αριθμός τηλεφώνου +30 210 28062-00