


PolyLoop összekötő eszköz (HX-400U-30)

Gyorstájékoztató

Figyelem: Ez az útmutató csak összefoglalja a HX-400U-30 PolyLoop használati utasításait. Feltétlenül kövesse az Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 használati utasítását, amelyet a HX-400U-30 készülék vásárlásakor mellékeltek.

Nómenklatúra

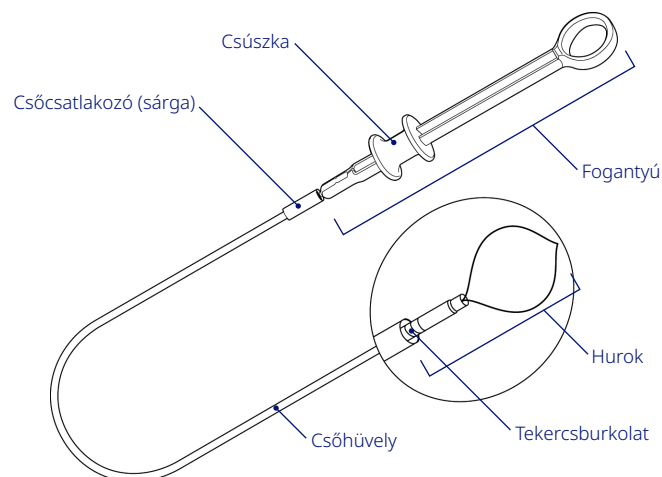


Előkészítés

1. Nyomja a csőcsatlakozást distalisan, hogy a hurkot visszahúzza a csőhüvelybe. Óvatosan helyezze be az eszközt a biopsziás szelepbe.

Művelet



2. Húzza a csőcsatlakozást a fogantyú érintéséig, hogy a hurkot kihúzza a csőhüvelyből.

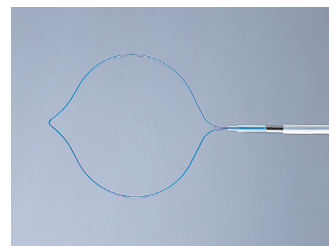

PolyLoop összekötő eszköz (HX-400U-30)


Gyorstájékoztató útmutató

Működés (folytatás)

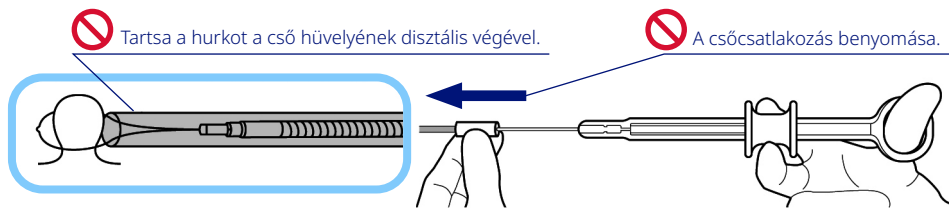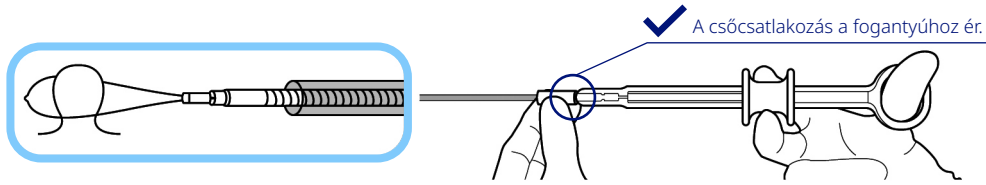

3. Vegye körül a szövetet a nyitott hurokkal.
Húzza a csúszkát a célszövet ligálásához.


Vigyázat: Ne alkalmazzon felesleges erőt a hurokra, amikor az eljárás során a szövetet leköti.

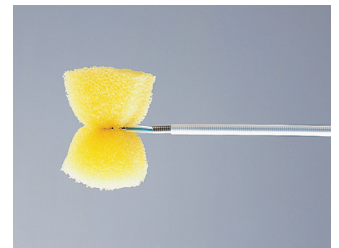

4. Nyomja a csúszkát a megállásig, hogy a horgot kihúzza a tekercs hüvelyéből. Oldja le a hurkot a horogról.

Vigyázat: Ne vegye le a hurkot a horogról, amíg a tekercshüvely nincs kihúzva a csőhüvelyből.


Vigyázat: A csőhüvely és a fogantyú proximális végét egyenesen az endoszkóp biopsziás szelepéhez tartva nyomja meg a csúszkát.

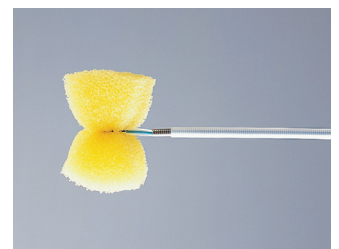

PolyLoop összekötő eszköz (HX-400U-30)

Gyorstájékoztató útmutató

Működés (folytatás)

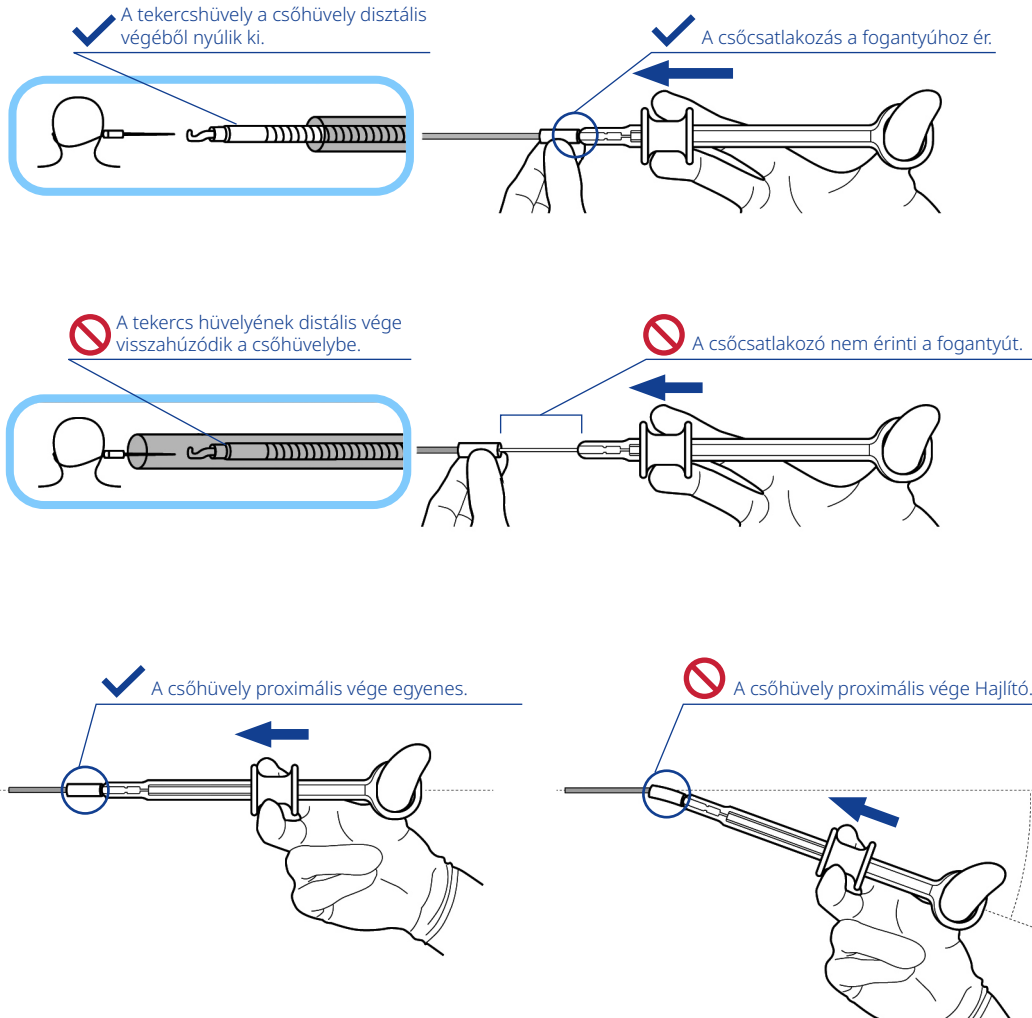

Megjegyzés: Mindig tartsa készenlétben az Olympus hurokvágót, fogót és/vagy drótvágót a tekercshüvely, a csőhüvely és a működési vezeték elvágásához arra az esetre, ha a hurok nem oldható le a műszerről.



PolyLoop összekötő eszköz (HX-400U-30)


Gyorstájékoztató útmutató

Sürgősségi kezelés

Ha a hurok nem oldható le a műszerről, kövesse az ebben a szakaszban leírt eljárásokat.


1. Egyenesítse ki az endoszkópnak a betegből kinyúló részét.

- Egyenesítse ki a műszer azon részét, amely a biopsziás szelepből nyúlik ki.
- Nyomja a csúszkát a megállásig, hogy a kampót kihúzza a tekercs hüvelyéből.

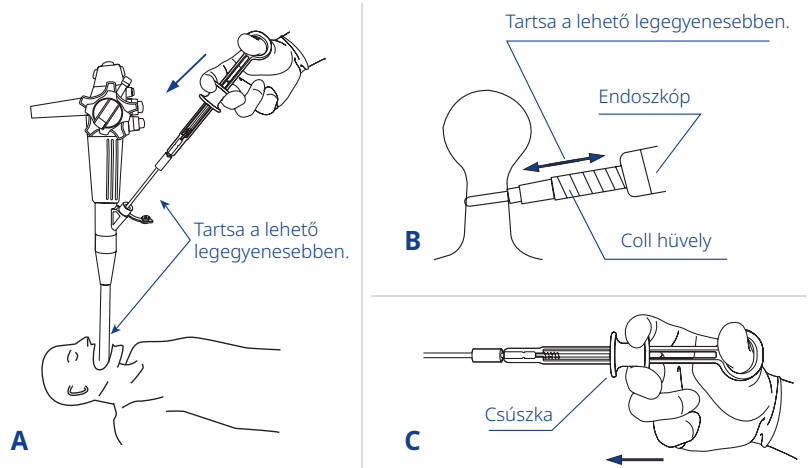


2. Vágja le a csőhüvelyt, a tekercshüvelyt és a működtetőhuzalt fogó vagy drótvágó segítségével.

- Húzza ki az endoszkópot.

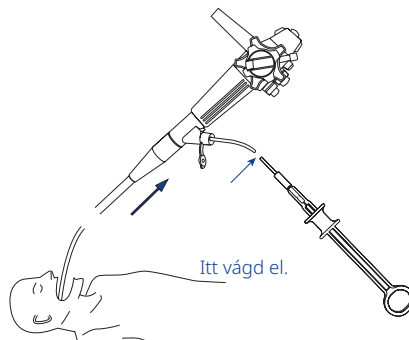

3. Ha a tekercshüvely disztális vége nincs közel a hurokzárhoz.

- Helyezze be ismét az endoszkópot a csőhüvely mentén.
- Vágja le a hurkot az Olympus hurokvágó segítségével.
- Húzza ki a csőhüvelyt, a tekercshüvelyt és a működtető vezetékét együtt.

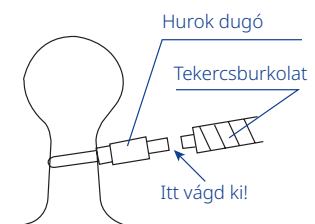

Amikor a tekercshüvely disztális vége közel van a hurokdugóhoz.

- Hagyja a hurkot a helyén, amíg a szövetek el nem pusztulnak, és a hurok és a szövetek ki nem szabadulnak. Ez eltarthat egy ideig.
- Végezzen nyílt műtétet vagy más lehetséges kezelést.

Az orvosi ismeretek folyamatos bővülésével együtt szükség lehet technikai módosításokra vagy a terméktervezésben, a termékleírásokban, a tartozékokban és a szolgáltatási kínálatban történő változtatásokra