


PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)

Hurtigveiledning

Advarsel: Denne veiledningen er bare et sammendrag av bruksanvisningen for HX-400U-30 PolyLoop. Sørg for å følge informasjonen i bruksanvisningen for Olympus EndoTherapy PolyLoop HX-400U-30 som fulgte med ved kjøp av HX-400U-30.

Terminologi

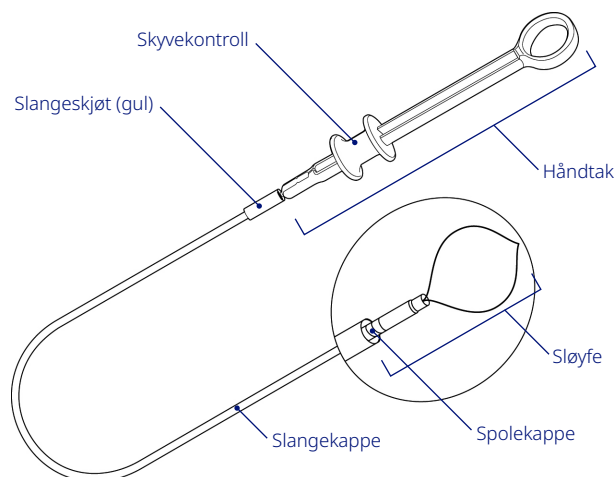


Forberedelse

1. Skyv slangeskjøten distalt for å trekke løkka inn i slangen. Før instrumentet forsiktig inn i biopsiventilen.

Drift



2. Trekk i slangeskjøten til den berører håndtaket for å trekke løkka ut av slangekappen.

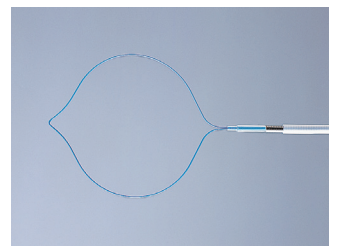

PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)


Hurtigreferanseveiledning

Drift (fortsettelse)

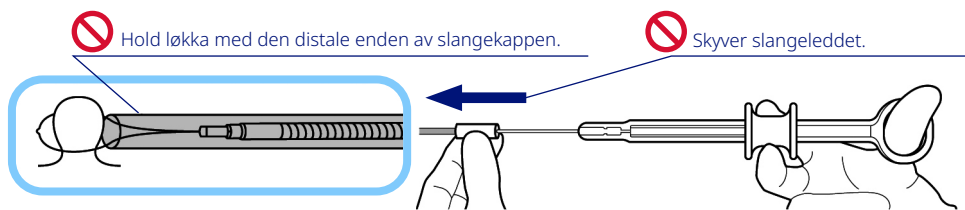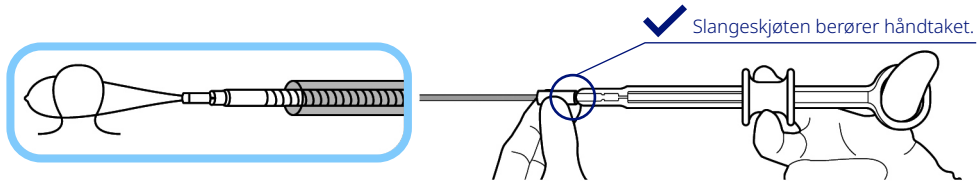

3. Omgi vevet med den åpne sløyfa. Trekk i skyvekontrollen for å ligere vevet som skal behandles.


Forsiktig: Ikke bruk unødvendig kraft på løkka når du ligerer vev under prosedyren.

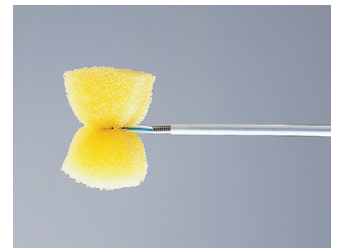

4. Skyv skyvekontrollen til den stopper, for å trekke kroken ut av spolekappen. Løsne løkka fra kroken.

Forsiktig: Ikke fjern løkka fra kroken så lenge spolekappen ikke er trukket ut av rørkappen.



Forsiktig: Med den proksimale enden av slangehylsen og håndtaket holdt rett mot biopsiventilen på endoskopet skyver du skyvekontrollen.

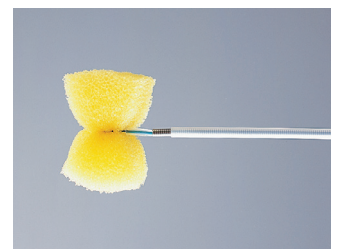

PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)

Hurtigreferanseveiledning

Drift (fortsettelse)

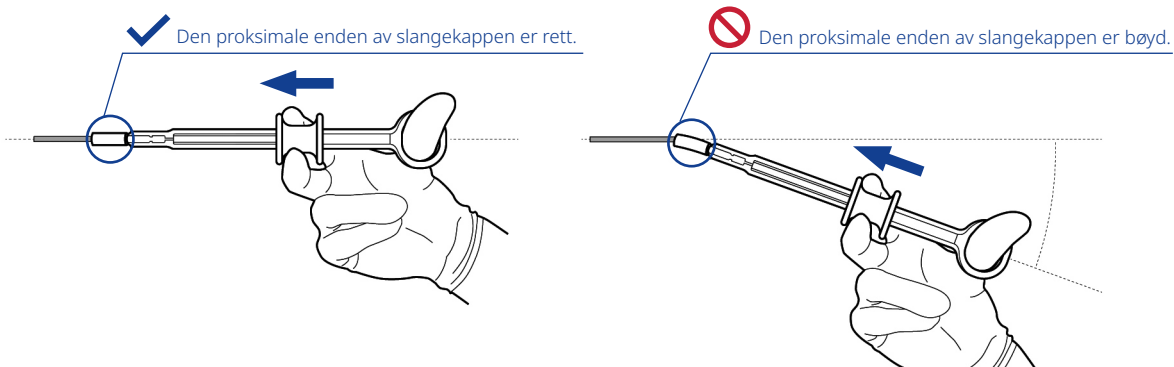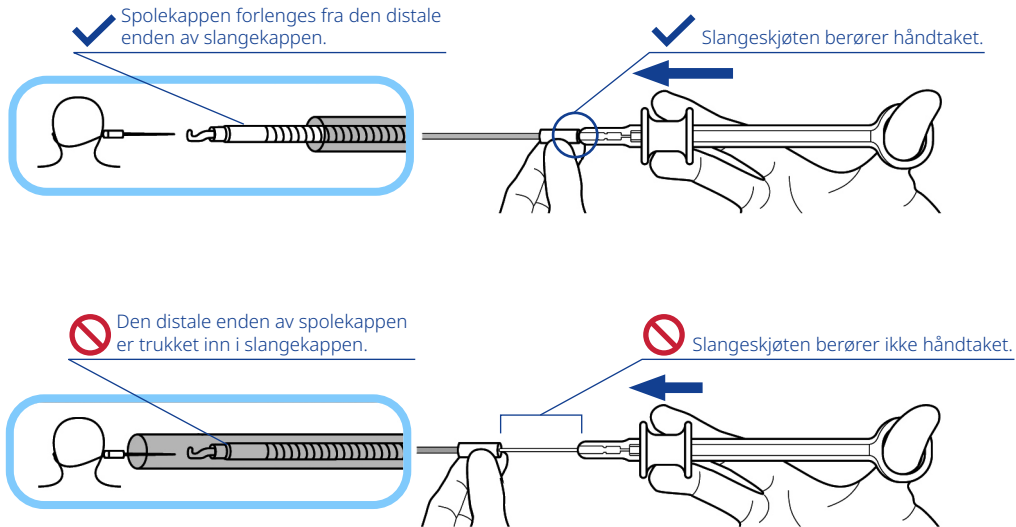

Merk: Ha alltid Olympus-sløyfekutter, -tang og/eller -avbitertang klar til å kutte spolekappen, slangekappen og operasjonstråden i tilfelle sløyfa ikke kan løsnes fra instrumentet.




PolyLoop ligeringsenhet (HX-400U-30)

Hurtigreferanseveiledning


Akuttbehandling

Hvis sløyfa ikke kan løsnes fra instrumentet, følger du prosedyrene som er beskrevet i dette avsnittet.

1. Rett ut den delen av endoskopet som stikker ut fra pasienten.
 - Rett ut den delen av instrumentet som stikker ut fra biopsiventilen.
 - Skyv skyvekontrollen til den stopper, for å trekke kroken ut av spolekappen.

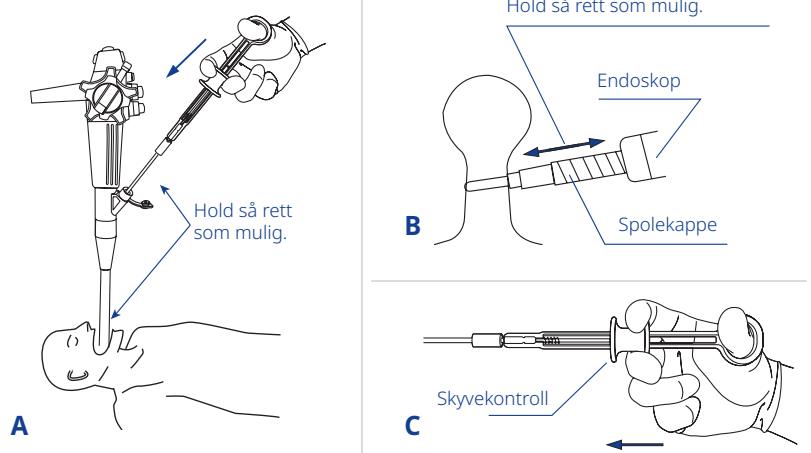


2. Klipp av slangekappen, spolekappen og driftskabelen ved hjelp av en tang eller avbitertang.
 - Trekk ut endoskopet.

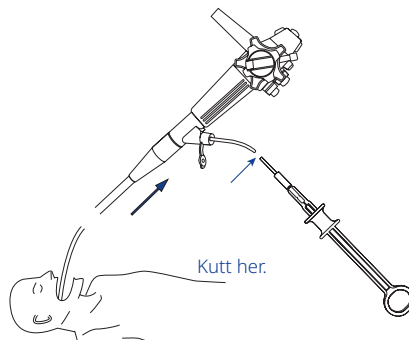

3. Når den distale enden av spolekappen ikke er nær løkkestopperen.

- Før endoskopet inn igjen langs slangekappen.
- Klipp løkka ved hjelp av Olympus-loop-saksa.
- Trekk ut slangekappen, spolekappen og kabelen sammen.

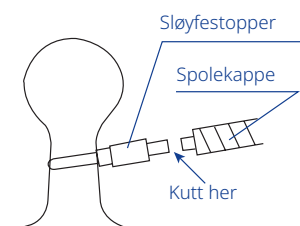

Når den distale enden av spolekappen er nær løkkestopperen.

- La løkka sitte på plass til vevet er nekrotisk og løkka og vevet løsner. Dette kan ta litt tid.
- Utfør åpen kirurgi eller annen mulig behandling.

Fordi kunnskapen vi har innen medisin, er i stadig utvikling, kan tekniske modifikasjoner og endringer på produktene, i spesifikasjonene til produktene og tilbehøret samt tjenestene som blir tilbudt, forekomme.